


A. 使用方法


1. 組み立て方法

本製品は再利用可能でリサイクル可能です。先端はプラチナシリコン製、中央のコネクターはカラーポリプロピレン（PP）製、ポンプはSEBSエラストマー製です。

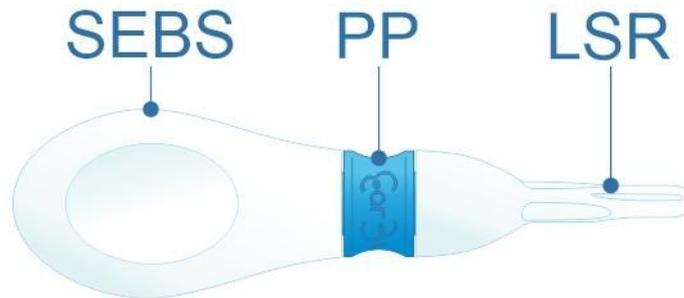


1.1 購入時は、既に3つのパーツが組み立てられている状態ですが、ご利用時は、工具や接着剤を使わずに簡単に分解・組み立てが可能です。分解は各パーツを慎重に引き離すことで行うことができます。

先端の膨らむ部分は繊細な作りになっておりますので、先端部分を引き離す場合は、膨らむ部分ではなく、ベルのような形の接続部分を持って引き離してください。組み立てをする際は、ベルのような部分を押し付けて組み立ててください。

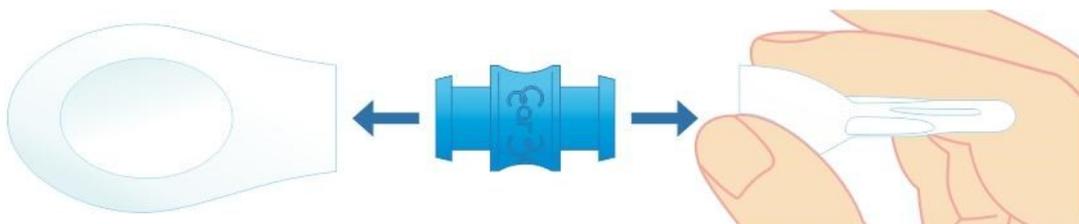

1.2 組み立てを行う際は、最初に真ん中のコネクタと①を接続した後に、②を接続してください。逆の手順で組み立てた場合、持ち手部分のくぼみに空気が入り、正しい使い方が出来なくなる場合があります。

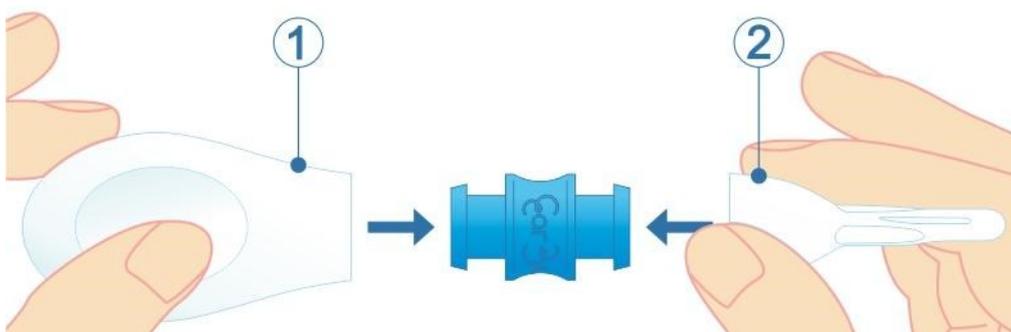

2. 使い方



毎回、使用する前にチップを石鹸と水で洗い、軽く乾燥させ、正しく先端部分が膨張しているか確認をしてください。チップの膨張面に図のようなストレッチマークが出ていないかも確認してください。

重要：シリコンチップの膨張面にストレッチマークが現れた場合は使用しないでください。ストレッチマークはチップが破裂する可能性を示しています。



ヒント: EarBuddyを耳の中に挿入しやすくするために、耳の上部または耳たぶを持って耳を少し後ろに引いてください



2.1 ポンプ部分の2つのくぼみを指で軽くはさみ、慎重に先端部分を外耳道内に挿入します。

2.2 **重要:** 挿入時に不快感や痛みがある場合は、使用を中止し、耳鼻咽喉科専門医に相談してください。



2.3 シリコンチップを外耳道に挿入したら、ポンプ部分を指で挟み、先端部分を外耳道の壁に密着する程度に膨らませます。強く膨らませると、耳から外す際に真空状態になり、不快感が生じる恐れがございますので、強く膨らましすぎないようにお気をつけください。



2.4 先端を膨らませたまま、耳の中から先端部分を引き抜きます。その際、違和感や痛みがある場合は、指のちからを抜いて、膨らみ具合を調節してください。

2.5 繰り返し使用する場合は、必要に応じて先端部分を洗浄、乾燥させてからご使用ください。

3. クリーニングとメンテナンス

重要: 洗浄に溶剤、消毒剤、アルコール性塩基、酸を使用しないでください。オイルを使用すると、チップの分子構造が損なわれる恐れがあります。洗濯機や食器洗浄機に入れしないでください。研磨剤や、器具の寿命を損なう可能性のあるいかなる種類の製品も使用しないでください。

- 3.1 デバイスは石鹼と水のみで洗い、使用の前後に乾燥させてください。
- 3.2 EarBuddyは常にケース内に保管し、必ず日光や熱から遠ざけてください。
- 3.3 EarBuddyの分解、組み立ては、必ず乾いた状態で行ってください。濡れた状態で行うと、カビの原因となります。
- 3.4 時間の経過とともに、装置内部の圧力が低下したり、外気圧の変化により、装置の先端が収縮することがあります。この場合、先端部を取り外して再度組み立てる（1.2参照）もしくは、先端部のベル型の部分を少し持ち上げ、新しい空気を内部に入れることによって、正しい状態に戻す事が出来ます。

4. 警告

重要: 過度に膨らませたり、引っ張ったりしないでください。過度な熱的、化学的ストレスを与えないでください。製品の寿命を縮めたり、適切な機能を損なうことがあります。

- 4.1 子供の手の届かないところに保管してください。
- 4.2 乳幼児には使用しないでください。9歳未満のお子様には使用しないでください。
- 4.3 外耳道の洗浄のみに使用してください。

- 4.4 不適切な使用は避けてください。
- 4.5 耳に問題や病気がある場合は、医師のアドバイスを受けた後にのみ使用してください。
- 4.6 高齢者や特に敏感な方が使用する場合は、特に注意することをお勧めします。
- 4.7 膨張可能な表面に模様やストレッチマークが現れた場合は、使用を取りやめてください。破裂する可能性があります。

5. 製品の廃棄

重要: お住まいの自治体の廃棄規則に従って廃棄してください。

6. メーカー情報

MioColibri S.r.l.

c/o Incubatore certificato Vega, Via delle Industrie 15 – 30175 Venezia (VE) – ITALIA

info@miocolibri.com - info@earbuddy.life - www.earbuddy.life